


Nombre del Producto
TENS EMS FITNESS BLUNDING 2 CANALES
Código

BEQ-15

Origen

Asia

Marca

Blunding

Descripción

Este electroestimulador 3 en 1, BEQ-15, es un dispositivo portátil de uso ambulatorio y doméstico que brinda tres funciones:

- a) TENS- Electroestimulación de las fibras nerviosas, “a través de la piel” cuya finalidad es el tratamiento analgésico de algunos tipos de dolores en hombros, cintura, espalda, cuello, brazos, piernas y pies, evitando el uso de medicamentos.
- b) EMS- Electroestimulación del tejidos musculares, para fortalecer o recuperar la tonicidad muscular .
- c) Fitness- Mejora específicamente el tono de los músculos abdominales.

Indicaciones

Alivio del dolor, aumento de tonicidad muscular .

Más información

Contiene Latex

No

| | |
|---|--|
| Componentes | 1 Electroestimulador 3 en 1 4 electrodos 2 cables para electrodos 1 Cable de carga USB Folleto Instrucciones de Uso en Español |
| Fuente de Alimentación | 3,7 V/250mAh batería de litio |
| Canal: | Dual- Regulables por separado |
| Impulso de frecuencia: | TENS:(20-100)Hz, EMS:(1-15)Hz, FITNESS:(2-16)Hz. |
| Ancho de pulso: | TENS: 120µs, EMS: 200µs, FITNESS: 200µs. |
| Impulso de forma de onda | De onda cuadrada |
| Desconexión de seguridad integrada | Si |
| Niveles de intensidad | 0-16 niveles |
| Tiempo de tratamiento | 15, 30 y 45 minutos ±10% |
| Condiciones de temperatura en funcionamiento | 5°C- +40°C |
| Condiciones de humedad en funcionamiento | 15%-93%RH |
| Presión Atmosférica | 700hPa-1060hPa |
| Interfaz de carga | Interfaz estándar USB V8 |
| Alto / Ancho / Largo: | 162mm X 83mm X 44mm |
| Peso | 230 g |
| Color | Blanco |

Codigo de barra

| SKU | Código de Barra |
|--------|-----------------|
| BEQ-15 | 7801001015375 |

Mantenimiento de Producto

1. Cuando finalice el tratamiento, coloque los electrodos sobre la película plástica y luego guárdelos dentro del paquete sellado.
2. Después de usar el dispositivo, límpielo suavemente con un paño ligeramente húmedo.
3. No use limpiadores abrasivos ni volátiles.
4. Cuando no lo esté usando, desconecte los cables conductores de la unidad y mantenga el dispositivo en su estuche.
5. No sumerja la unidad ni sus componentes en agua ni permita que entre agua en la zona interna del dispositivo.
6. Este dispositivo y sus accesorios (incluidos los electrodos) no necesitan ser esterilizados.
7. No someta la unidad, ni sus componentes, a frío o calores extremos.
8. No golpee el monitor. No deje caer el dispositivo al suelo.
9. No intervenir el aparato, ni abrirlo.
10. Dependiendo de la frecuencia con el que utilice este dispositivo: mensualmente, si lo usa a diario, o cada 15 días, si el uso es más esporádico, revise la integridad de las partes y piezas del producto. Valide que no exista presencia de óxido en las conexiones entre cables y electrodos.
11. Este producto está probado como autotratamiento simple y si se siguen las instrucciones, es un método seguro.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original.

Certificación y Registros

FDA 21 CFR 882.5890

CE 41371473-04

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922