



Nombre del Producto TENS BLUNDING 2 CANALES

Código BEQ-18

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción El electroestimulador TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), Blunding (BEQ-18), es un dispositivo portátil de uso ambulatorio y doméstico que opera bajo el principio de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, es decir, "a través de la piel". Este método, clínicamente probado, es eficaz y permite tratar ciertos tipos de dolores en hombros, cintura, espalda, parte trasera del cuello, brazos, piernas y pies, sin tener que usar medicamentos. Está aprobado como autotratamiento simple y si se siguen las instrucciones, es un método seguro.

Indicaciones Este dispositivo se debe usar con prescripción médica o profesional de la salud certificado y sólo para el alivio de dolor. *Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Más información



Contiene látex No

Componentes	1 TENS 4 electrodos 2 cables para electrodos 1 Cable de carga USB Folleto Instrucciones de Uso en Español
Fuente de Alimentación	3,7 V/250mAh batería de litio
Canal	Dual- Regulables por separado
Impulso de frecuencia	20-100Hz.
Ancho de pulso	120µs
Impulso de forma de onda	De onda cuadrada
Desconexión de seguridad integrada	Si
Niveles de intensidad	0-16 niveles
Tiempo de tratamiento	15, 30 y 45 minutos ±10%
Condiciones de temperatura en funcionamiento	5°C- +40°C

Condiciones de humedad en funcionamiento	15%-93%RH
Presión Atmosférica	700hPa-1060hPa
Interfaz de carga	Interfaz estándar USB V8
Alto / Ancho / Largo	162mm X 83mm X 44mm
Peso	230 g
Color	Blanco

Código de barra

SKU	Código de Barra
BEQ-18	7801001015382

Mantenición de Producto

Cuando finalice el tratamiento, coloque los electrodos sobre la película plástica y luego guárdelos dentro del paquete sellado. Después de usar el dispositivo, límpielo suavemente con un paño húmedo.

No use limpiadores abrasivos ni volátiles.

Cuando no lo esté usando, desconecte los cables conductores de la unidad y mantenga el dispositivo en su estuche. No sumerja la unidad ni sus componentes en agua ni permita que entre agua en la zona interna del dispositivo.

Este dispositivo y sus accesorios (incluidos los electrodos) no necesitan ser esterilizados.

No someta la unidad, ni sus componentes, a frío o calores extremos.

Revise la integridad de las partes y piezas del producto y conexiones entre cables y electrodos antes de usar.

Garantía

Este dispositivo está garantizado por Blunding por espacio de 3 meses a partir de su fecha de compra y para el primer comprador. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto o cualquier repuesto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el equipo defectuoso completo y en su envase original. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros

FDA 21 CFR 882.5890

CE 41371473-04

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922

