



Nombre del Producto	COJÍN DE FLOTACIÓN SECA TPU 41x46x7 CM
Código	B-CU-13
Origen	Asia
Marca	Blunding
Descripción	<p>Este cojín antiescara de flotación seca, esta diseñado para usarse con todo tipo de sillas (de ruedas, para autos, oficina, etc.). Posee un diseño segmentado y ajustable que disminuye los puntos de presión que se generan por la persona permanecer largas horas sentada. Está diseñado para adaptarse a la forma del usuario y brinda protección a la piel y tejidos blandos. Cuenta con veinte celdas de aire interconectadas lo que permite una inmersión profunda al propio tiempo que ofrece soporte homogéneo y constante a lo largo de toda la superficie del asiento. Las diferencias de puntos de presión sostenidos por las celdas permite mejorar la irrigación de los tejidos otorgando mayor oxigenación. Está concebido para un límite de peso de 143 kilos.</p>
Indicaciones	<p>Prevención de úlceras por presión</p> <p>Lumbalgias</p> <p>Ciática</p> <p>Escoliosis</p> <p>Hernia de disco vertebral</p> <p>Lesiones sacras leves</p>
Más información	
Contiene látex	No

Componentes	<p>1 Cojín de flotación seca TPU</p> <p>1 Funda transpirable y lavable</p> <p>1 Bomba manual de inflado</p> <p>1 Kit de Reparación</p> <p>Folleto Instrucciones de Uso en Español</p>
Beneficios	<p>Confortable: El tamaño del cojín permite un ajuste correcto de la curva de la zona lumbar y alivia el dolor.</p> <p>Tejido respirable. La cubierta del cojín, del lado delantero es una tela que proporciona comodidad y ventilación. El otro lado, utiliza tela antideslizante de alta calidad con velcro ajustable que mantiene el cojín en el lugar y no se mueve.</p> <p>Diseño ergonómico. Producto lo suficientemente elástico para proteger las vértebras. Mantiene su forma aportando soporte continuo. Durante su uso, las celdas de aires se mueven en todas las direcciones ajustándose a la forma del cuerpo, brindando descanso y confort.</p> <p>Amplia gama de campos de aplicación. Sillas de ruedas, sillas de oficina, cuando trabaja en la computadora, silla del auto, cuando conduce durante mucho tiempo, o cualquier situación que requiera largos períodos de sedestación.</p> <p>Está concebido para un límite de peso de 143 kilos.</p> <p>Funda transpirable, elástica y lavable.</p> <p>Fácil inflado manual.</p> <p>Producto manejable y ligero.</p> <p>Resistente al fuego y libre de látex</p>
Peso del cojin (g)	250
Alto / Ancho / Largo Cojin (Cm)	41x 46x 7 cm
Color del cojin	Negro
Peso del producto (g)	400
Alto / Ancho / Largo Producto	42 X 10 X 19,5 cm

Código de barra

SKU	Código de Barra
B-CU-13	7801001015467

Mantenimiento de Producto No modifique el cojín ni ningún componente. Si lo hace, puede dañar el producto y anulará la garantía.

Es importante la inspección permanente de la piel que tiene contacto con el producto. Por favor, siga las instrucciones de uso y diariamente revise la piel, para comprobar que no existe presencia de enrojecimiento o equimosis. En caso de experimentar alguno de los anteriores síntomas, deberá suspender de inmediato el uso del cojín.

Mantenga el cojín alejado de objetos afilados.

Cuando lave la funda, hágalo con agua, detergente neutro y colores similares. Mantenga el cojín alejado de objetos afilados, así como fuentes de calor intenso.

Revise periódicamente la funda y otros componentes del cojín, en busca de daños. Reemplácelos si es necesario. Si tiene dudas revise la sección "Solución de problemas".

Los cambios de altitud del asiento pueden requerir un ajuste del cojín.

Mantenimiento de Producto El cojín que ha estado a temperaturas menores a 0°C puede exhibir una rigidez inusual. Si tiene dudas revise la sección "Solución de problemas"

NO utilice la válvula de inflado como asa para transportar o tirar del cojín. Traslade su cojín por la base o por el asa de transporte que tiene la funda.

El uso de un bombín inapropiado, una funda o un kit de reparación que no sean compatibles con su producto puede anular la garantía.

No use el cojín como salvavidas. No es un dispositivo de flotación.

Garantía Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto o cualquier repuesto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el equipo defectuoso completo y en su envase original. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros ISO 13485:2016 Certificado Q6 072833 0008
ISO 9001:2015

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922