



Nombre del Producto **TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RÍGIDA BLUNDING**

Código BEQ-21

Origen Asia

Marca Blunding

Descripción Este es un instrumento médico digital que proporciona una lectura rápida y altamente precisa de la temperatura corporal de un individuo. Se puede usar en adultos y niños (neonatal en adelante). Cuenta con punta rígida y pantalla LCD para visualización de resultados de manera fácil y práctica. Su uso es bucal, rectal o axilar.

Indicaciones Adultos y niños que necesiten validar temperatura corporal/estados febriles

Contiene Látex No

Componentes	1 termometro punta rigida Folleto Instrucciones de Uso en Español
Beneficios	<p>Ofrece lecturas de medición en 30 segundos: rápidas, seguras y confiables Uso oral, rectal y axilar Punta redondeada para máxima comodidad durante la medición Ligero y compacto para facilitar su uso Pantalla LCD digital para una fácil lectura Resultados grados Celsius y Fahrenheit Memoria de la última lectura para seguimiento y control. Señal de alarma para temperaturas altas Tiene señal de alarma de temperatura alta para advertir el resultado al usuario que realiza la medición. Cuenta con apagado automático para economizar batería.</p> <p>Puede ser usado a nivel hospitalario y doméstico. Batería incluida y es reemplazable Resistente al agua Fabricado en material resistente a desinfectantes habituales</p>
Rango de medición	32.0°C (89.6°F) ~ 42.9°C (109.2°F)
Resolución del visualizador	0.1°C (0.1°F)
Precisión	35.0°C (95.0°F) ~ 39.0°C (102.2°F): ±0.1°C (0.2°F) Otro rango: ±0.2°C (0.3°F)
Precisión de medición:	C: +/- 0.1 –F: +/- 0.4
Batería	Una (1) batería reemplazable LR41 o SR41
Vida útil de la batería	2 años con uso 3 veces/ día
Condiciones de Operación	Temperatura: 10°C (50°F) ~ 40°C (104°F) Humedad: 10%~95% HR
Alto / Ancho / Largo (termometro):	125mm X 25mm X 9mm
Peso (termometro)	11 g
Color	Blanco

Código de barra	SKU	Código de Barra
	BEQ-21	7801001015535

Mantenimiento de Producto

Antes y después de cada uso, limpie el termómetro con un paño suave y alcohol isopropílico diluido en agua, o lávelo con agua jabonosa FRÍA.
La unidad puede sumergirse en agua o alcohol (solamente el modelo a prueba de agua).
No lo sumerja por un período de tiempo extenso ni lo esterilice hirviéndolo, en autoclaves de gas o vapor.
El termómetro debe usarse solamente bajo la supervisión de un adulto. No es un juguete para los niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
No camine, corra ni converse durante la medición de la temperatura.
Almacene la unidad en la funda protectora cuando no esté en uso.
No almacene la unidad donde vaya a estar expuesta a la luz directa del sol o a la humedad.
Evite las temperaturas extremas.
Deben evitarse las caídas y los golpes fuertes al termómetro.
No trate de desarmar la unidad, excepto para sustituir la batería.

Garantía

Este producto tienen una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original.

Certificación y Registros

FDA 21 CFR 880.2910
Directive 93/42/EEC FI15/07012-
1

Blinding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM198/14 y Registro FDA N° 9104922